



Une gamme
complète pour le
transport
d'échantillons
biologiques !



PARACALOR

Pour une très
bonne stabilité
de la température



MEDBAG

Pour vos
tournées
quotidiennes



FIRSTBAG

Pour vos trajets
de courtes
durées



LABELIANS

lines



PARACOLOR

Pour une très bonne stabilité de la température

LE +

Double paroi **amovible** pour faciliter le nettoyage

Très grand volume utile


Fermeture rapide par système scratch

Pourvue de 2 sangles + 1 bandoulière **réglable et amovible**

Porte-document externe **sécurisé** par un scratch

Fond doublé et **renforcé** par des sangles

Cloisons internes **amovibles** pour s'adapter à toutes les configurations

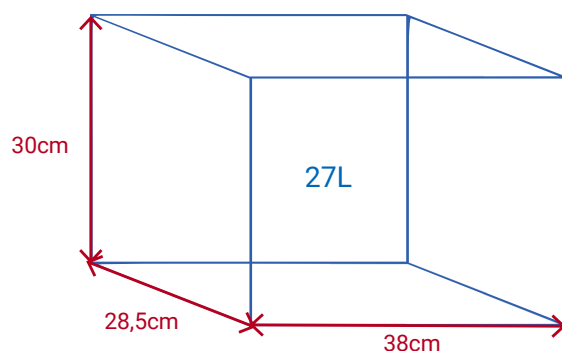

Système de fermeture unique



Pochettes pour source de froid ou accessoires



Housse amovible maintenue par un scratch, lavable en machine et séparations amovibles pour une configuration personnelle



Fermeture scratch avec grands rabats pour une meilleure isolation thermique



Désignation

Unité de commande

Réf.

Sacoche de transport isotherme résistante 27L Paracolor®

1

SITR27LAC



LABELIANS

lines

Une étude a été réalisée par le CEMAFROID - centre indépendant accrédité Cofrac, qui effectue des essais et des tests de matériels pour le transport ou la distribution sous température dirigée.

Protocole :

Le test effectué simule une tournée de 3h10 avec 12 prélèvements.

Au début de l'essai, la sacoche est conditionnée à 45°C, les packs froids (6 plaques de 3 bulles soit 1.648 kg d'eau) conditionnés à -20°C sont mis en place dans la sacoche à vide.

Un coffret est introduit toutes les 15 min, et la sacoche est ouverte pendant 30 sec. Les coffrets sont à température ambiante et sont constitués de :

- 2 tubes de prélèvements sanguins remplis de 9ml d'eau tempérée à 25°C
- 4 tubes de prélèvements sanguins remplis de 4ml d'eau tempérée à 25°C
- une aiguille à prélèvement et un porte-tube

Plan de chargement :

Les coffrets sont placés verticalement ce qui favorise les échanges thermiques et donc l'homogénéité de la température dans l'ensemble de la sacoche.

De plus, les tubes voyagent ainsi en position verticale.


Les mesures :

La température est enregistrée dans 12 tubes différents, un enregistrement de la température ambiante et un enregistrement de la température interne de la sacoche sont également effectués.

Un relevé est réalisé par minute.



Sac Isotherme de référence PCB2860B

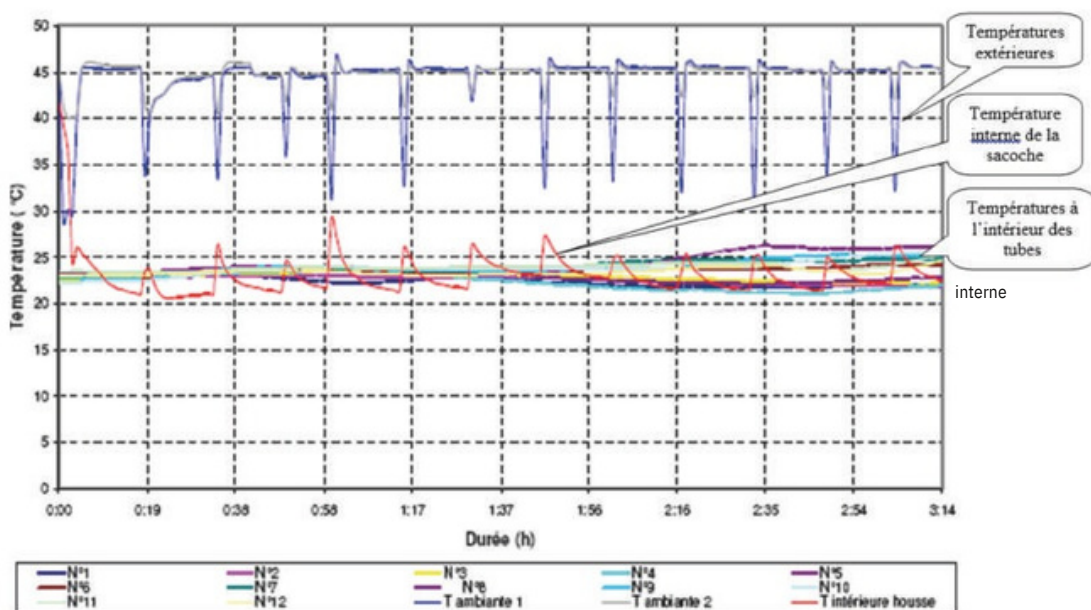

Les 60 tubes de prélèvement sont restés sous la barre des 25°C, dans le cadre d'une tournée de 3 heures 10 et à une température ambiante de 45°C !



LABELIANS

lines



MEDBAG

Pour vos tournées quotidiennes

Résistante
Pratique
Personnalisable



Poche interne pour source de froid



Version 3 et 10L,
paroi souple

+ produit

5 capacités pour s'adapter aux **besoins de l'infirmière et des coursiers**

Fournie avec des gels eutectiques +2/+8°C

Lessivable

Bandoulière de transport (amovible sur version 3L) = **Transport « mains libres »**

Fermeture à glissière «**plombable**»

Porte-étiquette transparente sur le dessus

2 couleurs disponibles en standard  

Couleur **personnalisable** à partir de 100 unités (nous consulter)

Sérigraphie personnalisable à partir de 25 sacoches

A partir du modèle 12L,
paroi semi-rigide



Parois isothermes en
mousse de polyuréthane

Capacité	Unité de commande	Réf. standard Réf. 06 Réf. 13		Unité de commande	Réf. personnalisée
					
3 litres – 24x24x10cm 1 pack froid souple de 190 grammes	1	MEDBAG03LB..		25	MEDBAG03L1CP
10 litres – 31x17x20cm 1 pack froid souple de 435 grammes	1	MEDBAG10L..		25	MEDBAG10L1CP
12 litres – 25x24x28cm 1 pack froid rigide de 600 grammes	1	MEDBAG12L..		25	MEDBAG12L1CP
27 litres – 31x31x31cm 2 packs froid rigides de 600 grammes	1	MEDBAG27L..		25	MEDBAG27L1CP
50 litres – 38x38x38cm 3 packs froid rigides de 600 grammes	1	MEDBAG50L..		25	MEDBAG50L1CP



LABELIANS

lines

Une étude a été réalisée en interne sur une durée de 12 heures.


Protocole :

Le test est effectué avec une sacoche MEDBAG de capacité 27L avec 2 x 600 grammes de gel eutectique +2/+8°C/

La température est enregistrée dans l'emballage secondaire à intervalle régulier toutes les 20 minutes.

Les mesures :

Les mesures de température sont réalisées avec un thermomètre muni d'un capteur placé dans un emballage secondaire de type SEROBOX.

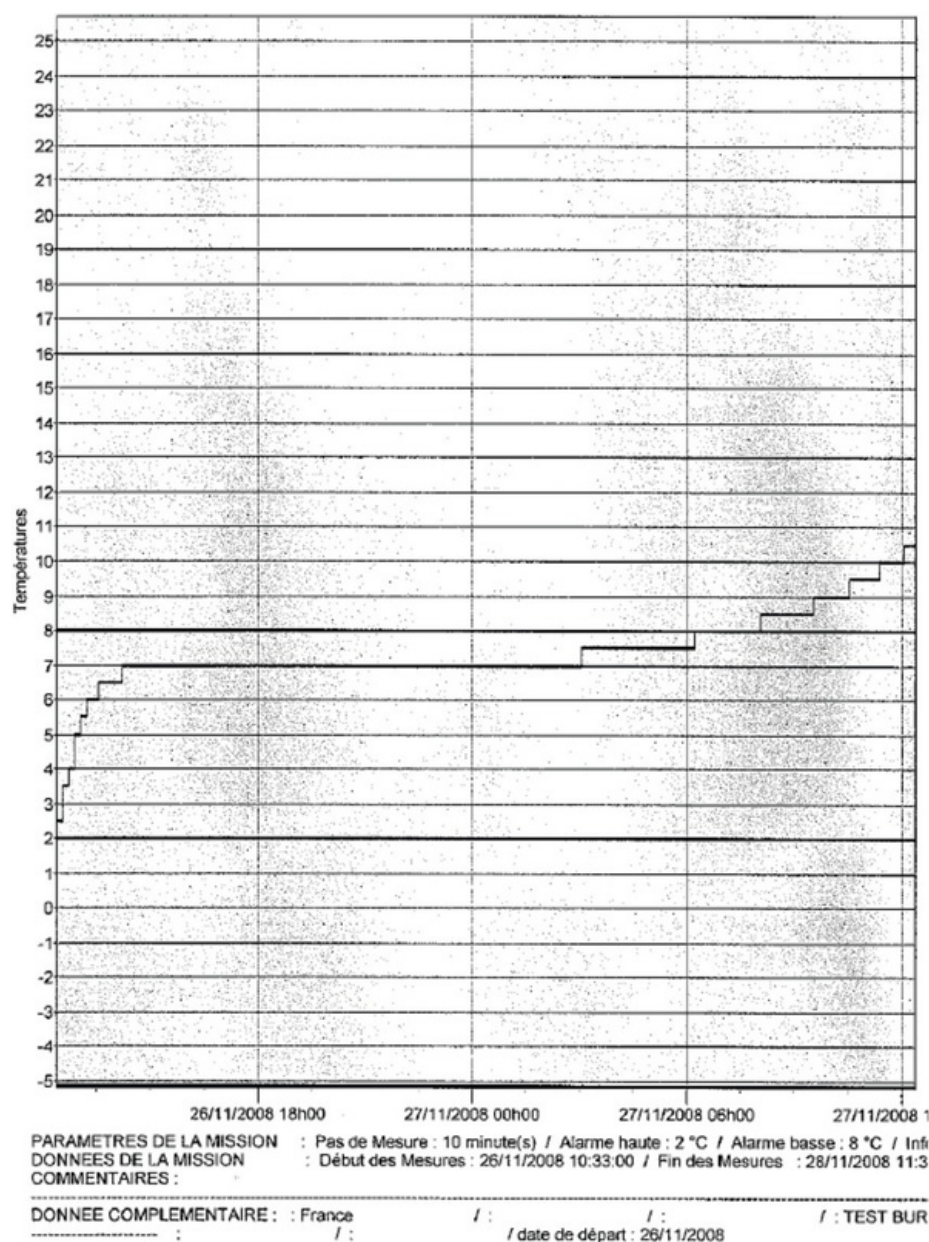

**Maintien d'une
température de
+2°C à +8°C
pendant 12
heures !**



LABELIANS

lines



FIRSTBAG

Pour vos trajets de courte durée



Du transport monopatient au transport interlaboratoires








Petit prix
Légère
Pratique



LES +

Présence d'une pochette extérieure transparente pour **faciliter l'identification**
Fermeture à glissière «**plombable**»
Lessivable

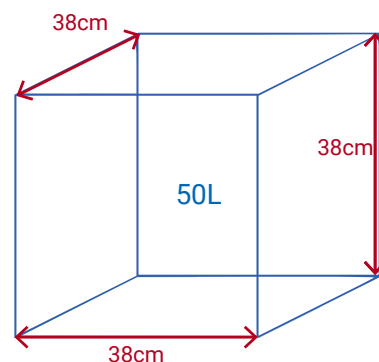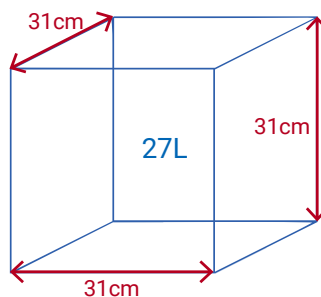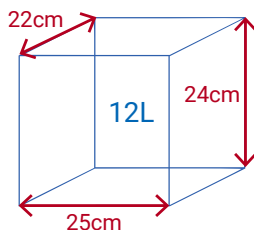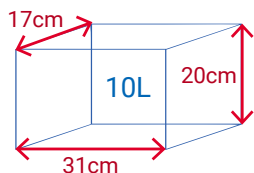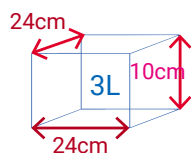

Capacité (en L)	Unité de commande	Réf.
3	1	FIRSTBAG03
10	1	FIRSTBAG10
12	1	FIRSTBAG12
27	1	FIRSTBAG27
50	1	FIRSTBAG50



LABELIANS

lines

Une étude a été réalisée en interne sur une durée de 2 heures.

Protocole :


Le test est effectué avec une sacoche FIRSTBAG de capacité 10L avec 1 x 435 grammes de pack froid.

La température est enregistrée dans l'emballage secondaire à intervalle régulier, toutes les 10 minutes.

Les mesures :

Les mesures de température sont réalisées avec un thermomètre muni de 2 sondes (1 sonde .(extérieure et 1 sonde intérieure

A T0, une première mesure est effectuée avant installation du pack froid dans la sacoche, puis toutes les 20 minutes :

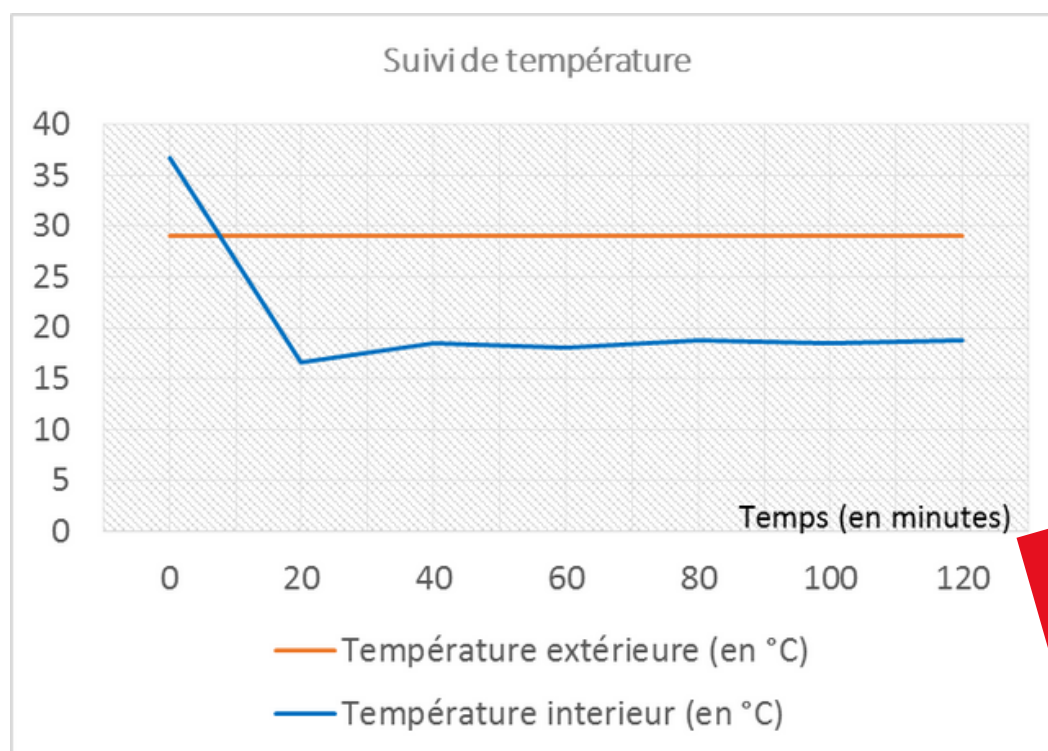

La température interne de la sacoche se stabilise **10°C en dessous de la température extérieure** sur la durée totale du test !

COMPOSEZ VOTRE SOLUTION DE TRANSPORT



FIRSTBAG



Tubes à prélèvements SOUMIS A L'ADR

Type d'échantillon à transporter	Capacité pour 1 boîte	Calage	Boîte	Visuel	Réf.	FIRSTBAG3L	FIRSTBAG10L	FIRSTBAG12L	FIRSTBAG27L	FIRSTBAG50L
					Dimensions intérieures (en mm)	230 x 230 x 90	230 x 230 x 90	230 x 230 x 90	302 x 302 x 302	368 x 368 x 368
	8 sachets monopatient (4-5 tubes)	CAEDL8SCTBT3	BTLOCK3.1L		Nb sachets	-	8	16	16	32
	35 tubes 5/7ml	CAEDL35TBT3	BTLOCK3.1L		Nb tubes	-	35	70	70	140
					Nb boîtes	-	1	2	2	4




Flacons de recueil d'urine SOUMIS A L'ADR

Type d'échantillon à transporter	Capacité pour 1 boîte	Calage	Boîte	Visuel	Réf.	FIRSTBAG3L	FIRSTBAG10L	FIRSTBAG12L	FIRSTBAG27L	FIRSTBAG50L
					Dimensions intérieures (en mm)	230 x 230 x 90	230 x 230 x 90	230 x 230 x 90	302 x 302 x 302	368 x 368 x 368
	12 flacons (40/60ml)	CAEDL12FBT4	BTLOCK4.7L		Nb tubes	-	-	-	24	24
					Nb boîtes	-	-	-	2	2




Microtubes NON SOUMIS A L'ADR

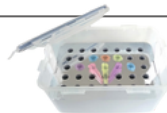Type d'échantillon à transporter	Capacité pour 1 boîte	Calage	Boîte	Visuel	Réf.	FIRSTBAG3L	FIRSTBAG10L	FIRSTBAG12L	FIRSTBAG27L	FIRSTBAG50L
					Dimensions intérieures (en mm)	230 x 230 x 90	230 x 230 x 90	230 x 230 x 90	302 x 302 x 302	368 x 368 x 368
	35 microtubes	CAEDL35TBT3	BTLOCK3.1L		Nb tubes	-	35	70	70	140
					Nb boîtes	-	1	2	2	4




Boîtes de Pétri (Culture sur gélose) NON SOUMIS A L'ADR

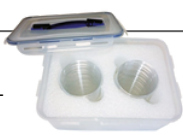Type d'échantillon à transporter	Capacité pour 1 boîte	Calage	Boîte	Visuel	Réf.	FIRSTBAG3L	FIRSTBAG10L	FIRSTBAG12L	FIRSTBAG27L	FIRSTBAG50L
					Dimensions intérieures (en mm)	230 x 230 x 90	230 x 230 x 90	230 x 230 x 90	302 x 302 x 302	368 x 368 x 368
	12 boîtes de Pétri (90mm max)	CAEDL12BPBT4	BTLOCK4.7L		Nb tubes	-	-	-	24	24
					Nb boîtes	-	-	-	2	2



Plaques de stockage (Culture sur gélose) NON SOUMIS A L'ADR

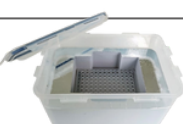Type d'échantillon à transporter	Capacité pour 1 boîte	Calage	Boîte	Visuel	Réf.	FIRSTBAG3L	FIRSTBAG10L	FIRSTBAG12L	FIRSTBAG27L	FIRSTBAG50L
					Dimensions intérieures (en mm)	230 x 230 x 90	230 x 230 x 90	230 x 230 x 90	302 x 302 x 302	368 x 368 x 368
	2 plaques DeepWell (ou 4 microplaques)	CAEDL2MBT3	BTLOCK3.1L		Nb tubes	-	2	4	4	8
					Nb boîtes	-	1	2	2	4



LABELIANS

lines



Disponible en bleu (06) ●
ou en rouge (13) ●
Autre couleur, nous contacter




MEDBAG						PARACALOR
● 3L/06 ● 3L/13	● 10L/06 ● 10L/13	● 12L/06 ● 12L/13	● 27L/06 ● 27L/13	● 50L/06 ● 50L/13	SITR27LAC	
230 x 230 x 90	304 x 164 x 194	224 x 214 x 234	302 x 302 x 302	368 x 368 x 368	380 x 270 x 270	
-	8	16	16	32	32	
-	35	70	70	140	140	
-	1	2	2	4	4	
● 3L/06 ● 3L/13	● 10L/06 ● 10L/13	● 12L/06 ● 12L/13	● 27L/06 ● 27L/13	● 50L/06 ● 50L/13	SITR27LAC	
230 x 230 x 90	304 x 164 x 194	224 x 214 x 234	302 x 302 x 302	368 x 368 x 368	380 x 270 x 270	
-	-	-	24	24	12	
-	-	-	2	2	1	
● 3L/06 ● 3L/13	● 10L/06 ● 10L/13	● 12L/06 ● 12L/13	● 27L/06 ● 27L/13	● 50L/06 ● 50L/13	SITR27LAC	
230 x 230 x 90	304 x 164 x 194	224 x 214 x 234	302 x 302 x 302	368 x 368 x 368	380 x 270 x 270	
-	35	70	70	140	140	
-	1	2	2	4	4	
● 3L/06 ● 3L/13	● 10L/06 ● 10L/13	● 12L/06 ● 12L/13	● 27L/06 ● 27L/13	● 50L/06 ● 50L/13	SITR27LAC	
230 x 230 x 90	304 x 164 x 194	224 x 214 x 234	302 x 302 x 302	368 x 368 x 368	380 x 270 x 270	
-	-	-	24	24	12	
-	-	-	2	2	1	
● 3L/06 ● 3L/13	● 10L/06 ● 10L/13	● 12L/06 ● 12L/13	● 27L/06 ● 27L/13	● 50L/06 ● 50L/13	SITR27LAC	
230 x 230 x 90	304 x 164 x 194	224 x 214 x 234	302 x 302 x 302	368 x 368 x 368	380 x 270 x 270	
-	2	4	4	8	24	
-	1	2	2	4	4	

BOITES DE TRANSPORT AVEC CALAGE ASSOCIE

Pour sécuriser vos échantillons

LES +

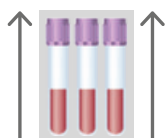

Maintien des tubes à la verticale
(recommandations du GFHT)

Diminution du risque d'AES
Stockage et transport facilités



Calage absorbant
12 flacons

Réf. CALEDL...



Calage intercalaire
pour 8 sachets
monopatients



Calage absorbant
35 tubes

Étanchéité
garantie
Économique
Simple

Nos équipes sont à votre service :

0 800 970 724

Service & appel
gratuits

serviceclient@labelians.fr

1, rue des Palis - 77140 NEMOURS

Pour vous renseigner, enregistrer vos commandes, vous former, vous conseiller, vous auditer et veiller à votre maintenance et métrologie ainsi qu'à vos exigences en terme de normes.

www.labelians.fr



LABELIANS

lines